

PCR検査キット利用にあたって

唾(だ)液の採取方法



■使用目的

この採取具は、唾液を安全に採取するためのものです。その他の用途で使用しないでください。

■保管

直射日光や高温多湿を避けて保管してください。

■その他注意事項

- 引火の恐れがありますので、チューブなどを火に近づけないでください。
- 不活化試薬は、飲み物ではありません。絶対に飲まないでください。
- 不活化試薬が目に入ったり、肌に触れた場合はすぐに水で十分に洗い流し、異常がある場合は専門医に相談してください。
- お子様やペットの手の届かない所で、使用・保管してください。



採取前は、最低1時間は飲食・喫煙をしないでください

食べ物や飲み物、化学物質などが口の中に残っていると正確な検査ができません。

Please do NOT eat or drink or smoke 1 hour before taking sample.



唾液収集用チューブに漏斗を取り付けます。
Please put blue cap on collection bottle.



チューブの目盛を参考にして、唾液を0.5~1ml入れます。
Please spit 0.5~1ml into the bottle.



不活化試薬の入ったチューブのキャップを外し、不活化試薬をチューブに全て入れます。
Pour the liquid which is in inactivated reagent bottle into the bottle.



チューブを縦に持ち、漏斗を取り外します。
Take off blue cap.



キャップでしっかり締めます。
Put red cap on collection bottle.



チューブを5回ほど上下にひっくり返し、よく混ぜます。最後にもう一度キャップが締まっていることを確認します。
Please shake the bottle 5 times.



採取後はできるだけ早く返送してください。

採取当日に返送できない場合は冷暗所で保管して下さい。

Please send it as soon as possible. If you can't send it on the collecting day, please keep it in cool and dark place.

唾(だ)液の梱包方法

①チューブを吸収パッドで包む

②吸収パッドで包んだチューブをバイオハザードバッグに丸めて入れる

③バイオハザードバッグを気泡緩衝材に丸めて入れる

④セロハンテープでとめる

